

MA SÉANCE CRISTAL Pro

Que se passe-t-il durant une séance CRISTAL Pro® ?

Votre médecin mesure l'épaisseur du tissu adipeux à l'aide de l'échographe et définit les paramètres de traitement pour atteindre vos objectifs. Puis il applique une lingette cryoprotectrice sur la zone à traiter. Une fois les applicateurs posés, la cristallisation des graisses commence et va durer en moyenne entre 40 et 60 minutes. Confortablement installé(e), vous n'avez plus qu'à vous détendre, lire ou écouter de la musique. Une fois la séance terminée, votre médecin massera la zone traitée pour accélérer le processus lymphatique et l'élimination des cellules graisseuses.

Puis-je reprendre une activité normale après une séance ?

Il n'y a aucun temps d'arrêt nécessaire avec le traitement CRISTAL Pro® car c'est une méthode non invasive. Vous pouvez donc reprendre vos activités quotidiennes dès la fin de la séance.

Quand vais-je constater les résultats ?

Il n'y a pas de résultats immédiats car les cellules graisseuses sont éliminées progressivement par le système lymphatique. À partir de 4 à 6 semaines, vous pourrez observer les résultats, mais vous continuerez à éliminer pendant les mois qui suivent.

CRISTAL Pro® est-elle sûre et présente-t-elle des effets secondaires ?

Le traitement CRISTAL Pro® est non invasif et parfaitement sûr avec plus de 1 000 000 de traitements réalisés dans le monde. Cette technique cristallise uniquement les cellules graisseuses et n'affecte aucun autre tissu environnant. Les effets secondaires sont légers tels que des rougeurs, de petites ecchymoses ou enflures ainsi qu'une sensation d'engourdissement de la zone traitée. Ces effets disparaissent naturellement dans les heures ou les jours qui suivent la séance.

Combien de séances sont nécessaires ?

Les résultats varient d'un patient à un autre, mais il suffit en général d'une à trois séances sur une même zone pour obtenir les résultats que vous désirez.

Les résultats sont-ils permanents ?

La graisse est cristallisée puis éliminée définitivement de votre organisme, le résultat est donc permanent. À vous de prendre soin de votre toute nouvelle silhouette grâce à une alimentation équilibrée et à une activité physique régulière.

BROCHURE PATIENT-CRISTAL-PRO-FR-v1.6-290922

CRISTAL Pro®, conçu et fabriqué par DELEO (France).

Dispositif médical de classe IIa. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE, délivré par l'organisme notifié BSI. Il permet de traiter principalement les amas graisseux localisés par le froid. Prendre connaissance de la notice avant toute utilisation. Respecter les conditions d'utilisation mentionnées sur la notice. En cas de doute sur l'utilisation / contre-indications, il est recommandé de consulter préalablement votre médecin.

CRISTAL®

Body-Layering®

Commencez votre programme CRISTAL Body-Layering® !

Étape 1/ Redessinez votre silhouette avec **CRISTAL Pro®**, dispositif de cryolipolyse médicale qui élimine la graisse tenace ;

Étape 2/ Sculptez votre silhouette avec **CRISTAL Fit®**, la technologie de Stimulation Musculaire Electromagnétique Haute Intensité pour tonifier et galber vos muscles ;

Étape 3/ Raffermissiez votre peau avec **CRISTAL-Skin®**, pour une remise en tension cutanée et une réduction de la cellulite fibreuse.

Demandez conseil à votre professionnel de santé



TECHNOLOGIE
FRANÇAISE

www.cristalbodylayering.com

CRISTAL®

Pro

ÉTAPE 1

JE REDESSEINE MA SILHOUETTE
ET DÉTRUIS LES CELLULES
GRAISSEUSES

LA CRYOLIPOLYSE MÉDICALE POUR AFFINER

☆☆☆ Jusqu'à - 30% de réduction
des cellules graisseuses *



Traitement du corps
& visage



4 zones traitées en 1 seule
séance



Sans chirurgie & sans temps
d'arrêt

CE
2797

* NAOURI, M. (2016), FAT REMOVAL USING A NEW CRYOLIPOLYSIS DEVICE. A RETROSPECTIVE STUDY OF 418 PROCEDURES. J EUR ACAD DERMATOLOGY & VENEREOLOGY, 31: E158-E160. DOI:10.1111/JDV.13899.

by **Deleo**
CRÉATEUR EN
ESTHÉTIQUE MÉDICALE

LE CONCEPT DE CRYOLIPOLYSE MÉDICALE

Grâce à l'innovation de cryolipolyse médicale **CRISTAL Pro®**, il est désormais possible de remodeler sa silhouette dans son ensemble, autant sur le corps que sur le visage.

Le traitement de 4 zones en simultané permet de sculpter rapidement l'ensemble de votre corps :



Le rêve du ventre plat → traitement simultané des poignées d'amour et de la zone abdominale supérieure et inférieure.



Des cuisses affinées → traitement de l'intérieur et de l'extérieur des deux cuisses en une seule séance.



L'ovale du visage redessiné → traitement du double menton et des lignes de la mâchoire.

CRISTAL Pro® vous offre des solutions sur mesure pour éliminer vos complexes et vous sentir bien dans votre corps.

LE TRAITEMENT CRISTAL Pro® EST-IL FAIT POUR MOI ?

Oui, si vous cherchez une méthode efficace pour harmoniser votre silhouette sans chirurgie et faire disparaître en douceur vos bourrelets disgracieux.

La cryolipolyse médicale **CRISTAL Pro®** est possible à tout âge et sur toutes les parties du corps qui présentent un amas graisseux, aussi bien pour la femme que pour l'homme.

Il s'agit d'un acte médical qui doit toujours être encadré par un médecin. Il est indispensable de réaliser une consultation préalable avec votre médecin pour vérifier que vous ne présentez aucune contre-indication.

DEMANDEZ DES RENSEIGNEMENTS SUR CETTE TECHNIQUE À VOTRE MÉDECIN.

COMMENT FONCTIONNE CETTE TECHNOLOGIE ?



CRISTAL Pro® est un dispositif de cryolipolyse médicale de dernière génération. Cette procédure permet la cristallisation des cellules graisseuses qui s'autodétruisent sous l'action du froid. Pendant le traitement, l'amas graisseux est refroidi jusqu'à -12°C entre 40 à 60 minutes en moyenne.

La graisse cristallisée va ensuite s'éliminer naturellement et définitivement au fil des semaines suivant la séance, pour laisser place à des courbes harmonieuses. Cette technique est non invasive et ne nécessite aucune anesthésie. L'efficacité et la sécurité de cette technologie ont été prouvées par de nombreuses études cliniques.

CRISTAL Pro® est un dispositif médical destiné à des traitements de cryolipolyse. Il couvre l'indication médicale suivante :

- Traitement de la graisse sub-aréolaire localisée pour les patients masculins présentant une pseudogynécomastie.
- **CRISTAL Pro®** a également des indications non-médicale. Il est efficace pour :
 - La réduction d'amas graisseux localisés.

DES RÉSULTATS VISIBLES ET DURABLES

@DR.SCHINAZI



AVANT

ABDOMEN

APRÈS 1 SÉANCE

@DR.MALET



AVANT

CULOTTE DE CHEVAL

APRÈS 1 SÉANCE

@DR.SCEMAMA



AVANT

POIGNÉES D'AMOUR

APRÈS 1 SÉANCE

@DR.SARFATI



AVANT

DOUBLE MENTON

APRÈS 1 SÉANCE

